

Maybe Baby Minimikroszkóp

E 010

A családtervező

Őn mindig tudni fogja, hogy mikor termékeny: 72 órás előrejelzés a női nyálból. Mikor sikerülhet? Mikor kell vigyázni? Nem kell a tablettára? Nincs bevált módszer? A teherbeesés ellen, vagy éppen a családtervezésért sokan sokféle módszert használnak. Mi egy megbízható, egyszerű és mindenki által elfogadható eszközt ajánlunk! Évtizedek óta bevált, nőgyógyászok által is javasolt egyéni egészségdiagnosztikai eszközt, amely minden női táskában diszkrétan elfér és egyszerűen használható. Használatával gyorsan és egyértelműen, 72 órás előrejelzéssel megállapítható a női nyálból, hogy a menstruációs ciklus során melyek a termékeny, ill. terméketlen napok. Ajánljuk azoknak a pároknak, akik gyermeket szeretnének és azoknak a hölgyeknek, akik nem használnak kémiai fogamzásgátlókat.

Alkalmas más módszer melletti ellenőrző tesztlésre is.

- Klinikailag tesztelt



ALKALMAZÁSI JAVASLAT:

- azoknak a pároknak, akik gyermeket szeretnének
- azoknak a pároknak, akik nem szeretnének gyermeket
- azoknak a pároknak, akik szeretnének gyermeket, de problémáik vannak és szeretnék tudni, hogy mikor legvalószínűbb a fogamzás
- azoknak a nőknek, akiknek menstruációs ciklusuk nem rendszeres
- azoknak a pároknak, akik stresszmentes intim életet szeretnének
- azoknak a nőknek, akik nem akarnak kémiai fogamzásgátlót alkalmazni és viselni annak káros mellékhatásait
- másodlagos sterilitás esetén a peteérés napjának meghatározására
- természetes fogamzásgátlásra

A készülék alkalmas a születendő gyermek nemének befolyásolására egy bizonyos mértékben:

- amikor a páfrányminta első jele kezd feltűnni, akkor lány megfogására,
- amikor pedig a páfránszerkezet a legfedettebb akkor fiú megfogására van nagyobb esély.

- ! Ellenjavallatok: nem ismeretesek.
- ! Mellékhatások: nem ismeretesek.

Maybe Baby Minimikroszkóp

E 010

A családtervező

A hordozható zsebmikroszkóp lencséjére nyálat cseppentünk és hagyjuk megszáradni. 15 perc múlva megállapíthatjuk az eredményt.

- A nemkívánatos terhesség elkerülésére: amikor a pontozott szerkezet látható, a szexuális együttlét nem vezet fogamzásra.
- Amikor a vegyes páfrány szerkezet látható, bármilyen természetes fogamzásgátlást ajánlatos alkalmazni.
- Az utódtervezés legkívánatosabb időszakának meghatározására (gyakori szexuális együttlét ajánlott abban az időszakban amikor vegyes vagy egyértelműen a páfrány szerkezet látható).
- A mintán a legfedettebb páfrány szerkezet megjelenése egybeesik a peteérés napjával (szexuális együttlét ajánlott).

Kérdések és válaszok:

• *Megbízható-e a Maybe Baby?*

Abban az esetben, ha a készüléket az utasításnak megfelelően használjuk, az eredmény 96-98% lehet, hasonlóan a többi laboratóriumi vizsgálatokhoz.

• *Melyik a legmegelőbb idő a készülék használatára?* Ébredés után 10-15perccel, napközben 3 órával fogmosás, étkezés, italfogyasztás illetve dohányzás után.

• *A rendszertelen ciklus esetén alkalmazható-e készülék?* Természetesen, a női ciklus normál esetben 28 napos, de 19 és 45 napos is lehet. Egy hosszabb ciklus esetén, akár 2 (extra) ovuláció is jelentkezhet.

• *Milyen képet mutat a mikroszkóp szoptatás ideje alatt?* Az esetek 99%-ban negatív. 1% alatt van a lehetőség a páfrányos szerkezet mutatóására.

• *Megbízható-e a MB szoptatás ideje alatt?* A megváltozott hormonháztartás miatt, nem hagyatkozhatunk a készülékre.

• *Milyen kép jelenik meg változókor esetén?* Általában negatív, aprószemcsés mintázat látható, bizonyos területen páfrányos, de teljes páfrányos kép nem jelenik meg.

• *Milyen képet mutat a készülék, ha a szájüregben gyulladós folyamat van jelen?* A gyulladós folyamat fajtájától, intenzitásától függően, az apró szemcséstől a teljes páfrányos szerkezetig, ilyenkor az eredmény nem megbízható.

• *Miért használjam a MB-t, ha az ovuláció minden 14. napon történik?* A 14. napon történő ovuláció csak statisztikai adat! A 19-45 napos ciklusban +/- 2, 3 nap eltérés is lehet, általában a ciklus közepén várható.

• *Mi az oka annak, hogy egy rendszeres menstruációs ciklus esetén soha sem jelenik meg a páfrányos szerkezet?* Létezik ovuláció nélküli (anovuláris) ciklus, ami jelentkezhet a még nem szült nők esetében. Meddőségre is utalhat, ebben az esetben forduljunk orvoshoz.